

BreastLight - Brustuntersuchung mit Licht zur Eigenuntersuchung



Breastlight ist ein innovatives Medizinprodukt für Frauen. Es hilft Frauen zu jeder Zeit, ihre Brüste zu untersuchen und Veränderungen festzustellen.

Set mit: Gerät, aufladbarer Akku mit Ladegerät, Gleitgel und Informations-DVD.

Mit Breastlight bekommen Sie einen genauen Einblick in Ihre Brüste.

Breastlight sendet ein helles Licht durch das Brustgewebe, sodass Sie Details in Ihrer Brust sehen können.

Auf diesem Wege können Sie lernen, was für Sie normal ist.

Sie können Veränderungen frühzeitig erkennen und sich dadurch sicherer fühlen.

Breastlight ist ein neues, innovatives Produkt und wurde bereits von über 1.200 Frauen getestet.

Alle Studien verliefen äusserst positiv: Die Frauen empfinden die regelmässige Brustkontrolle als wichtigen Teil der Selbstuntersuchung und sagten aus, dass Ihnen eine Untersuchung mit Breastlight mehr Sicherheit über Ihre Brustgesundheit gibt.

Knoten in der Brust

Insbesondere Frauen mit Knoten in der Brust, die sich schwer abtasten lassen, stellten fest, dass Breastlight ein sehr nützliches Hilfsmittel für die Selbstkontrolle ist.

Grössere Brüste

Frauen mit grösseren Brüsten fühlten sich bsher weniger sicher bei der Selbstkontrolle. Sie berichteten, dass Breastlight ihnen mehr Vertrauen gibt.

Fragen und Antworten

Warum sollte Breastlight im Dunklen verwendet werden?

Nur ein kleiner Anteil des roten Lichts, welches benötigt wird, um die Blutgefäße zu beleuchten, scheint durch die Brust. Je dunkler der Raum, desto leichter ist Breastlight anzuwenden.

Wie oft sollte Breastlight angewendet werden?

Sie können das Gerät zur Routineuntersuchung so oft verwenden, wie Sie möchten.

Ist Breastlight ungefährlich in der Anwendung?

Das von Breastlight ausgesandte Licht ist sichtbar und völlig ungefährlich. Sie können das Gerät so oft verwenden wie Sie möchten, da keine Nebenwirkungen entstehen.

Woher weiss ich, dass ich Breastlight richtig anwende?

Wenn Sie Fragen zum Breastlight Gerät haben oder sich nicht sicher sind, ob Sie das Gerät richtig anwenden, so können Sie unsere Hotline anrufen. Sie erreichen die Hotline unter 03671-357146 (montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.30 Uhr und freitags bis 15.00 Uhr).

Was ist, wenn ich mir nicht sicher bin was ich mit Breastlight erkenne?

Wenn Sie Veränderungen der Brust bei der Verwendung von Breastlight oder Ihrer routinemässigen Selbstuntersuchung festgestellt

haben, so kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren behandelnden Arzt. Es kann durchaus eine unbedenkliche Veränderung sein, Ihr Arzt wird Ihnen Gewissheit geben.

Was ist, wenn ich etwas in meiner Brust fühle, aber trotzdem mit Breastlight nichts erkennen kann?

Sprechen Sie darüber möglichst umgehend mit Ihrem Arzt. Es kann sich um eine harmlose Situation handeln. Ihr Arzt wird Sie entsprechend informieren, damit Sie in diesem Punkt beruhigt sein können.

Was ist, wenn ich etwas mit Breastlight sehen, dieses jedoch nicht ertasten kann?

Sie sollten hierüber möglichst umgehend mit Ihrem Arzt sprechen. Es kann sich durchaus um eine harmlose Erscheinung handeln. Ihr Arzt wird Sie entsprechend informieren.

Soll ich trotz der Benutzung von Breastlight die routinemäßige Brustuntersuchung fortsetzen?

Unbedingt! Breastlight soll nicht die routinemässige Brustuntersuchung ersetzen, die ab einem Alter von 50 Jahren durchgeführt wird. Breastlight soll nur als ein Teil der regelmäßigen Heimanwendung eingesetzt werden.

Kann ich das Breastlight auch benutzen, wenn die Batterien nicht voll geladen sind?

Wenn der Ladezustand der Batterien zu niedrig ist, schaltet sich das Licht automatisch aus. Wenn dieses geschieht können Sie die Untersuchung trotzdem fortsetzen, in dem Sie das Breastlight mit dem Adapter direkt an die Steckdose anschließen.

Warum soll ich bei der Breastlight - Untersuchung ein Gleitgel benutzen?

Einige Frauen finden es angenehmer, wenn der Kopf des Breastlight - Gerätes leichter über die Haut gleitet. Wenn Sie das Gleitgel einsetzen, dann verteilen Sie dieses bitte über die gesamte Brust. Überschüssiges Gleitgel kann nach der Untersuchung einfach abgewischt werden. Benutzen Sie nur das original Breastlight - Gleitgel auf wässriger Basis. Gleitgele auf Ölbasis können Ihr Breastlight - Gerät beschädigen.

Was bedeutet "Brust-Bewusstsein"?

Ärzte empfehlen, dass Frauen wissen sollten, wie ihre Brust aussieht und wie sich ihre Brust beim Tasten anfühlt. Damit wird ihnen bewusst, was eine normale, gesunde Brust ist. Das nennen die Ärzte "Brust-Bewusstsein".

http://www.drogi.ch/SHOP/contents/de-ch/p2239_BreastLight_-_Brustuntersuchung_mit_Licht_zur_Eigenuntersuchung_-_Komplettes_Set.html